



U·ALIGNER



Para todas
as Idades

U-Aligner

É um tratamento ortodôntico transparente que através de alinhadores invisíveis e removíveis permite a correção do seu sorriso. São projetados, utilizando tecnologia 3d, para realizar pequenos movimentos de maneira a ser um tratamento muito confortável e para todas as idades.

Produzido em Portugal, desenvolvido e aprovado por Médicos Dentistas, nossa equipa está preparada para oferecer suporte clínico e técnico completo.

Vantagens

3. **TRANSPARENTE**
Não afeta a vida social ou profissional

4. **PREVISIBILIDADE**
Nossa tecnologia permite ver como ficará o tratamento

2. **CONFORTÁVEL**
Pode ser usado em qualquer idade, criança, jovem, adulto ou idoso

5. **LIBERDADE**
Por serem removíveis não há restrição de alimentos

1. **REMOVÍVEL**
Seja para lavar os dentes ou eventos importantes

6. **PRECISÃO**
Precisão no resultado e na adaptação dos alinhadores

O que esperar do U-Aligner?

Após avaliação do utente seguindo o formulário que lhe será enviado, para orientar na análise, e a certeza de que o caso está indicado para o tratamento com U-Aligner, nossos técnicos irão realizar o planeamento. Cada movimento será analisado por nossos técnicos e com auxílio de um *software* indicará quantos alinhadores serão necessários para obter o sorriso final.

Será enviado o planeamento com possibilidade de alterações, se for necessário, com auxílio de um especialista técnico de nossa equipa, além disso é disponibilizado um visualizador com antes e depois, de maneira que esta seja também uma ferramenta de comunicação com seu utente. Também serão recomendados ações para obtenção do melhor resultado, tais como uso de elástico ou desgaste interproximal.



Uma vez aprovado o planeamento, será enviado uma sequência de alinhadores que podem ou não corresponder a toda a sequência de tratamento, dependendo do caso, isso porque queremos garantir o melhor resultado para seu utente, desta forma acompanhamos o desenvolver do caso e auxiliamos clinicamente se assim for necessário.

Durante todo o tratamento, disponibilizamos técnicos de nossa equipa para tirar quaisquer dúvidas sejam elas clínicas ou técnicas que venha a ter.

Como funciona



1 IMPRESSÃO/ DIGITALIZAÇÃO

Impressão dos dentes deve ser realizada com silicona de adição ou a digitalização direta das arcadas com scanner intra-oral.

2 PLANEAMENTO/ APROVAÇÃO

O planeamento é realizado por nossa equipa e enviado para análise e aprovação com utilização de um software de visualização.

3 IMPRESSÃO 3D/ PRODUÇÃO

O tempo de produção está relacionado a complexidade do caso, desta forma asseguramos um excelente padrão de qualidade.

4 EMBALAGEM/ ENVIO

Depois de produzidos os alinhadores recebem um tratamento para desinfecção e são devidamente embalados um a um e enviados a si.

5 TRATAMENTO

Os alinhadores devem ser substituídos a cada 7/10 dias dependendo do caso e utilizados até a obtenção do sorriso ideal planeado.

“ Altamente estético, é uma excelente ferramenta para o Médico Dentista na correção do sorriso. ”

Dra. J Dantas




Indicações

	<p>Apinhamento</p> <p>● 1-3 mm ● 3-6 mm ● > 6 mm</p>	Casos severos de apinhamento requerem além de desgaste interproximal, bastante conhecimento técnico do Ortodontista em tratamento com alinhadores.
	<p>Espaçamento</p> <p>● 0-3 mm ● 3-6 mm ● > 6 mm</p>	Casos severos de espaçamento requerem restaurações adicionais para fechamento do espaço ou a finalização com espaços residuais previamente identificados no planeamento.
	<p>Sobremordida</p> <p>● 0-1 mm ● 1-3 mm ● > 3 mm</p>	Casos severos de sobremordida são complexos, necessitam aparatos prévios para abertura da mordida e conhecimento técnico do Ortodontista em tratamento com alinhadores.
	<p>Sobressaliência</p> <p>● 0-2 mm ● 2-4 mm ● > 4 mm</p>	Casos severos de sobressaliência requerem conhecimento técnico do Ortodontista com alinhadores e o conhecimento prévio no planeamento da possível permanência de uma leve sobressaliência.
	<p>Linha média</p> <p>● 0-2mm ● 2-4mm ● > 4mm</p>	Casos severos de desvio de linha média requerem desgaste interproximal e bastante conhecimento técnico do Ortodontista em tratamento com alinhadores.
	<p>Mordida aberta</p> <p>● 0-0,5mm ● 0,5-1mm ● > 1mm</p>	Casos severos de mordida aberta não são possíveis com o U-Aligner, recomendando que sejam realizados casos de até 0,5mm de mordida aberta e conhecimento técnico do Ortodontista.
	<p>Inclinação distal</p> <p>● 0-10° ● 10-15° ● > 15°</p>	Casos severos de inclinação dos molares requerem aparatos de distalização, além de attachments e até mesmo mini-implantes ortodônticos e bastante conhecimento técnico do Ortodontista.

Ciência e tecnologia



O U-Aligner foi meticulosamente pensado e desenvolvido com base em diversos estudos relacionados a eficácia dos alinhadores, de maneira que o design e a espessura dos nossos alinhadores promovam o máximo de resultado com o máximo conforto ao utente.

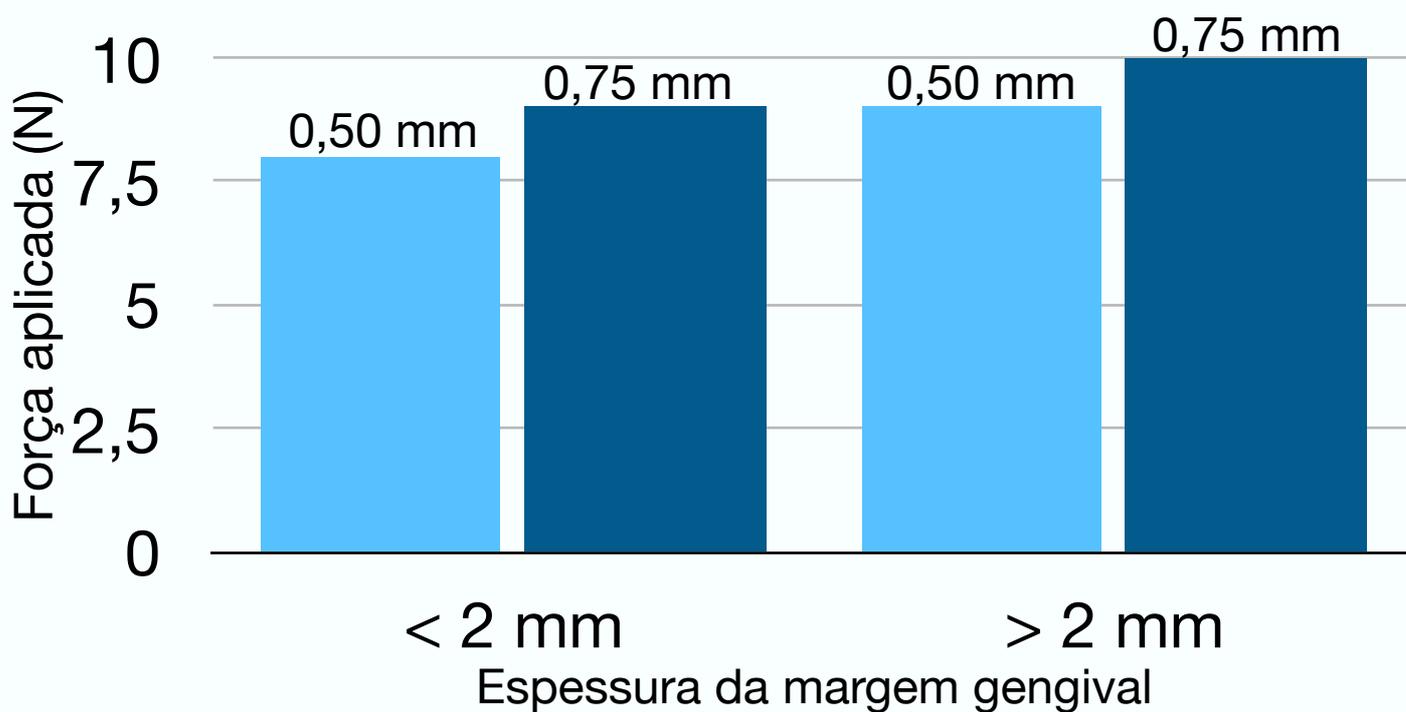

Recomendações

É recomendado que para obtenção de ótimos resultados que o utente utilize o alinhador por 22h/dia, sete dias por semana ininterruptos.

Quanto a higienização, uso de escova macia e água é suficiente para uma correta limpeza do alinhador, não sendo recomendado uso de produtos químicos de higiene sobre o U-Aligner.

Suporte

Acesse nosso sítio em www.u3ddental.com e conheça mais sobre o U-Aligner e suas vantagens. Nossa equipa está preparada técnica e cientificamente para auxiliar em suas dúvidas, entre em contato conosco sempre que precisar.